

RIFAK Horizontal - Ranger Green

RIFAK (Rip-Away IFAK) è il nuovo kit individuale di primo soccorso progettato per contenere i presidi medici salvavita necessari all'attuazione del protocollo MARCH. La RIFAK conta due componenti distinte: un involucro esterno e un inserto interno estraibile, dove sono contenuti i presidi medici. Il sistema di sgancio è stato sviluppato per essere estremamente sicuro ma anche intuitivo da estrarre.

CARATTERISTICHE:

- Grazie al sistema Rip-Away, l'operatore sarà in grado di raggiungere tutti i presidi medici in meno di 6 secondi.
- Non c'è rischio che i presidi medici possano fuoriuscire accidentalmente dall'inserto, anche estraendolo bruscamente, perché sono vincolati su tutti i lati.
- Non sono stati aggiunti "abbellimenti" (es. croci mediche, velcro, ricami...) che possano confondere l'operatore. L'unica porzione evidenziata in rosso è la maniglia di estrazione.
- Il cordino elastico esterno può essere usato per comprimere le dimensioni della tasca oltre che per trasportare un Tourniquet.
- Sui PALS/MOLLE laterali è possibile installare ulteriori tasche e/o vincolare strumenti come Forbici, Strap-Cutter e Tourniquet.

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RIFAK Horizontal Ranger Green](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RIFAK Horizontal Ranger Green

Introduzione

Il RIFAK (RipAway IFAK) è un kit individuale di primo soccorso progettato per contenere i presidi medici salvavita necessari all'attuazione del protocollo MARCH. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il RIFAK sia utilizzato solo da personale addestrato e competente.
- Controlla regolarmente il contenuto del kit per garantire che tutti i presidi medici siano presenti e in buone condizioni.
- Non utilizzare il kit in caso di danni evidenti all'involucro esterno o all'inserito interno.
- Mantieni il kit in un luogo facilmente accessibile ma fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il sistema RipAway solo come indicato. Non forzare l'estrazione dell'inserito interno.
- Assicurati che il kit sia fissato saldamente durante l'uso per evitare che si stacchi accidentalmente.
- Verifica che tutti i presidi medici siano correttamente posizionati all'interno dell'inserito prima di richiuderlo.
- Non sovraccaricare il cordino elastico esterno, poiché potrebbe compromettere la funzionalità del kit.
- Evita di utilizzare il kit per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Kit:

- Posiziona il RIFAK in un luogo facilmente accessibile, come una borsa o un veicolo di emergenza.
- Assicurati che il kit sia fissato correttamente utilizzando il sistema PALS/MOLLE laterale per ulteriori tasche o strumenti.

2. Uso del Kit:

- In caso di emergenza, afferra la maniglia di estrazione rossa e tira con decisione per rimuovere l'inserito interno.
- Accedi rapidamente ai presidi medici all'interno dell'inserito per fornire il primo soccorso necessario.
- Dopo l'uso, riposiziona i presidi medici e richiudi l'inserito per una conservazione sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali medici e dei rifiuti.
- Non gettare il kit o i presidi medici nell'immondizia comune.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire in sicurezza i materiali utilizzati o scaduti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il RIFAK. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare la risposta alle tue domande.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del RIFAK Horizontal Ranger Green. Seguire queste istruzioni contribuirà a mantenere la sicurezza e l'efficacia del kit di primo soccorso.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it